

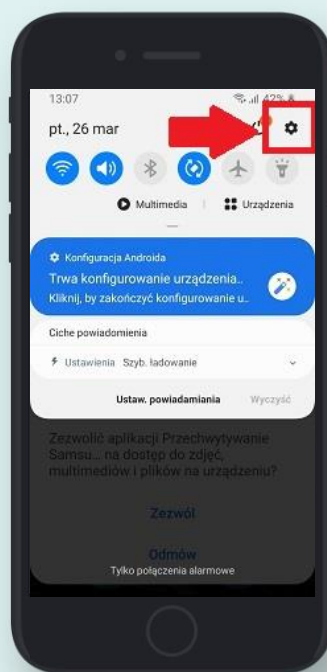


Instrukcja aktualizacji aplikacji mobilnej drEryk Kardio


1. Odblokuj telefon przeciągając palcem z góry do dołu na ekranie startowym.
2. W prawym górnym rogu kliknij w symbol koła zębatego.

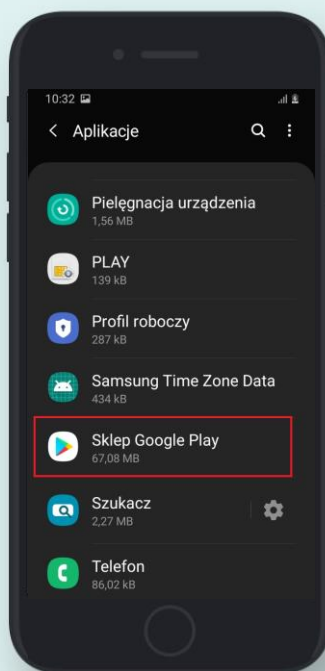


3. Przesuwając palcem z góry do dołu ekranu znajdź pole o nazwie „Aplikacje”.
4. Z listy dostępnych aplikacji znajdź tą o nazwie „Sklep Google Play” i kliknij w nią.

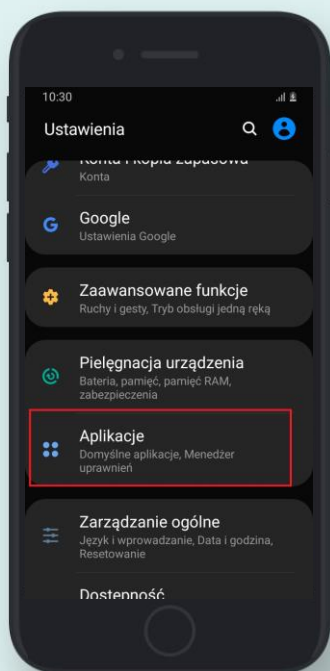


5. W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się komenda „Otwórz” – kliknij w nią.

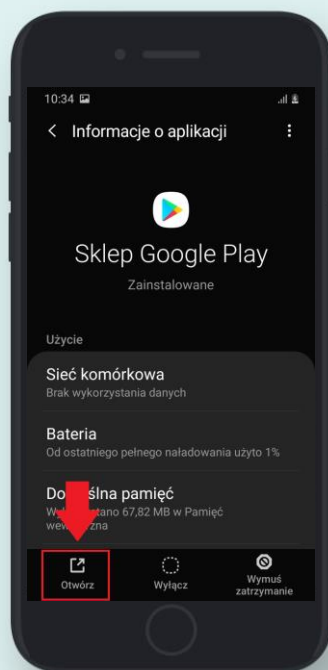

6. Z dostępnych aplikacji wybierz Kardio. Następnie, kliknij w przycisk „Aktualizuj”.

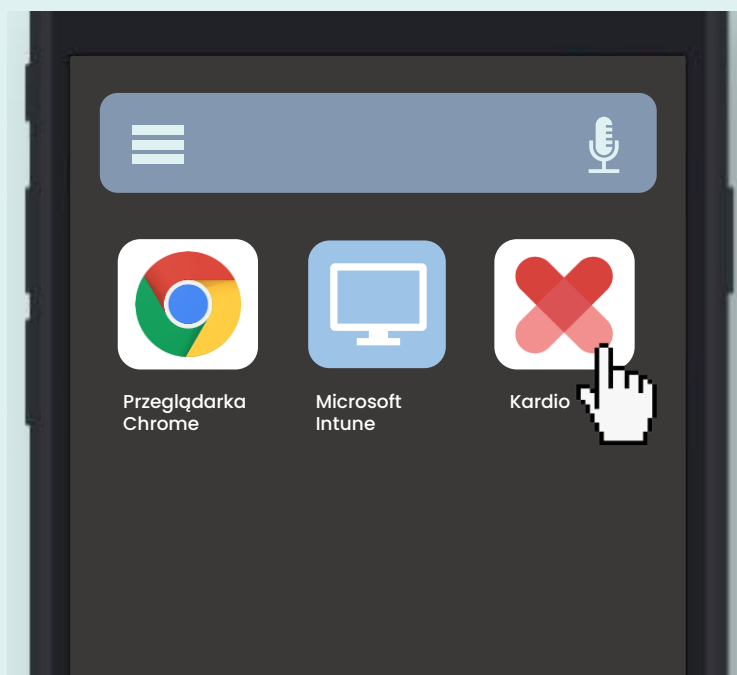

7. Jeżeli proces został przeprowadzony poprawnie, po wejściu do aplikacji w dolnej części panelu logowania powinieneś zobaczyć informację o aktualnej wersji.

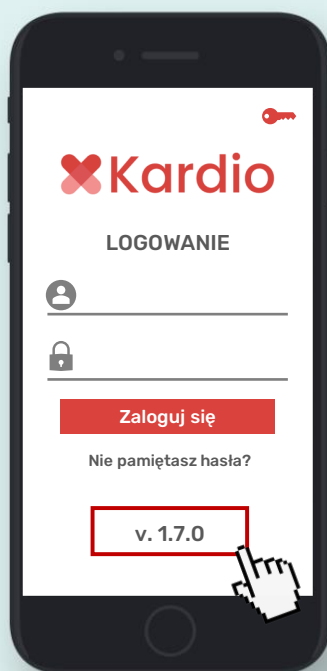

- Jeżeli nie jesteś pewien któregoś kroku, nie wykonuj go samodzielnie; skontaktuj się z Działem Wsparcia drEryk Kardio.
- Możesz również pozostawić telefon włączony, system sam zaktualizuje aplikację do najnowszej wersji w ciągu 24h.
 - Nie usuwaj aplikacji Kardio, ani żadnej innej z telefonu.

Wsparcie Techniczne drEryk Kardio

W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Infolinia: (+48) 12 380 08 84 (wewn. 2)
E-mail: wsparciekardio@dreryk.pl